

Handleiding Borstpositioneringsvest

Versie: april 2025

Inhoudsopgave

1. Inleiding	2
2. Gebruik	3
3. Onderhoud.....	4



1. Inleiding

1.1. Beoogd gebruik

Het borstpositioneringsvest is bedoeld voor het in de juiste positie houden van de gebruiker in een daarvoor bestemde zitvoorziening. De borstpositioneringsvest worden vaak gebruikt wanneer er weinig voorwaartse en of zijwaartse stabiliteit is, alsmede bij spasticiteit.

Dit hulpmiddel biedt ondersteuning van de romp. De ondersteuning wordt gelijkmatig verdeeld over de romp. Het rekbaar materiaal biedt comfort en vrijheid met behoud van de veiligheid. Het borstpositioneringsvest is te gebruiken tot een lichaamsgewicht tot 100 kg. Gebruik de borstpositionering eventueel in combinatie met een zitbroek of bekkengordel afhankelijk van het advies van een onafhankelijk deskundige.

1.2. White label

Het borstpositioneringsvest is een white label product onder merknaam van een dealer. Het product wordt geproduceerd door en valt onder de verantwoordelijkheid van Aleidis Upholstery Parts B.V.. Met klachten of opmerkingen kunt u zich, eventueel via uw dealer, wenden tot Aleidis. Aleidis is enkel aansprakelijk bij een juist gebruik van dit hulpmiddel (zie paragraaf 2).

1.3. Disclaimer

Het borstpositioneringsvest is niet ter vervanging van de autogordel in vervoer: auto, fiets, taxi, bus of openbaar vervoer. De chauffeur is verantwoordelijk voor een veilige transfer door een adequate gordel conform wetgeving.

Bij het niet naleven van deze instructie kan Aleidis als fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventueel geleden schade aan personen en/of materieel.

De [algemene voorwaarden](#) van Aleidis zijn van toepassing.

1.4. Productvarianten

Het vest is te verkrijgen in 5 maten (XS, S, M, L en XL), waarbij XS t/m M specifiek gericht zijn op kinderen. Naast de standaard klikgespuitvoering is tevens een uitvoering met een pen/gat- of autogordelsluiting te verkrijgen.

1.5. Adres Fabrikant

Aleidis Upholstery Parts B.V.
Leiweg 2a
5386 KR Geffen
Noord-Brabant (Nederland)
073-5325032


2. Gebruik

Voor de veiligheid en een goede toepassing van dit hulpmiddel is het belangrijk om de volgende aanwijzingen op te volgen. Verkeerd aanbrengen of toepassen kan tot ernstig letsel leiden.



De bevestiging op de zitvoorziening vindt plaats door een deugdelijke gesp. Deze zitten veelal op de voorziening maar zijn ook los te bestellen bij Aleidis (zie foto als voorbeeld):

- Beoordeel de kwaliteit van de klapgesp op deugdelijkheid, inclusief de bevestiging op de voorziening
- Beoordeel of de gesp goed schoon is
- Beoordeel of de gesp goed is gesloten
- Beoordeel of de gebruiker de gesp al dan niet zelf kan openen

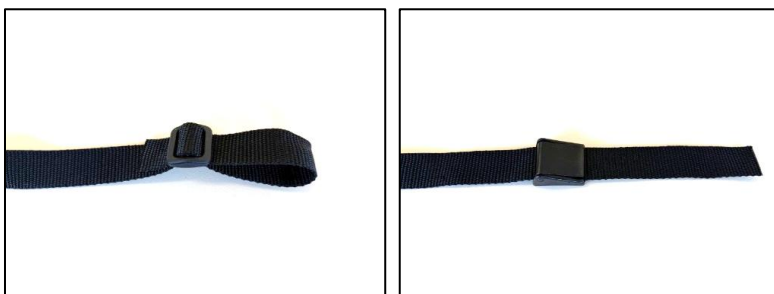

De positionering vindt als volgt plaats:

- Monteer de schouderbanden (I) altijd een beetje boven schouderhoogte van het kind
- Monteer de onderste banden (II) op taillehoogte
- Let op dat de overtollige bandlengte niet tussen de rollende delen kan komen

Trek alle banden altijd stevig aan ten behoeve van optimale veiligheid, ondersteuning en comfort. Het borstpositioneringsvest is correct aangebracht wanneer men twee vingers tussen het gordelsysteem en het lichaam van de gebruiker kan doen. Alle gespen moeten altijd gebruikt worden. Controleer het borstpositioneringsvest voorafgaand aan ieder gebruik op gebreken.



Voor een optimale zitpositie, en om te voorkomen dat de gebruiker omlaag en van de stoel glijdt, adviseren we altijd een heupgordel of zitbroek te gebruiken in combinatie met het borstpositioneringsvest.



Overige aanwijzingen:

- Zorg voor permanent toezicht, het alleen laten van de gebruiker zonder toezicht is niet toegestaan
- Roken of het dragen in nabijheid van vuur is niet toegestaan in verband met brandgevaar
- In geval van onrust is het flexibel vest niet geschikt, en dient een ander type vest de voorkeur. Uw dealer kan u hierover adviseren

Neem bij twijfel over de montage contact op met de dealer of met een medewerker van Aleidis.



De laatste versie van de montage-instructies staat altijd op de website van Aleidis.

3. Onderhoud

3.1. Wassen

- Was in de wasmachine op een koud of lauw (max. 30°C) programma voor fijne was of wol/zijde
- Laat niet centrifugeren
- Gebruik een kleine hoeveelheid wasmiddel zonder bleekmiddel
- Gebruik geen wasverzachter
- Niet strijken
- Laat het vestje drogen aan de lucht, stop deze NIET in de droogtrommel